



Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica

Gaita örneğinden ***Cryptosporidium parvum*, *Giardia lamblia* ve *Entamoeba histolytica***'nın aynı anda ayrı ayrı kalitatif tespitini yapan immunokromatografik tek adım hızlı tanı testi

- Monoklonal antikor yapı
- Yüksek sensitivite ve spesifisite
 - Sensitivite : *Crypto, Giardia, Entamoeba* > %99
 - Spesifite : *Crypto, Giardia, Entamoeba* > %99
- 30 saniyelik uygulama
- Santrifuj ve pipetleme gerektirmeyen basit prosedür
- Kullanıma hazır dolu diluent tüpleri
- 5-10 dakikada sonuç
- Kolay yorumlama için farklı renkte sonuç çizgileri
- Harici pozitif kalite kontrol
- Oda sıcaklığında saklanabilme
- 20 testlik kaset
- Üretimden itibaren 24 ay raf ömrü

CERTEST BIOTEC

Test prosedürü:

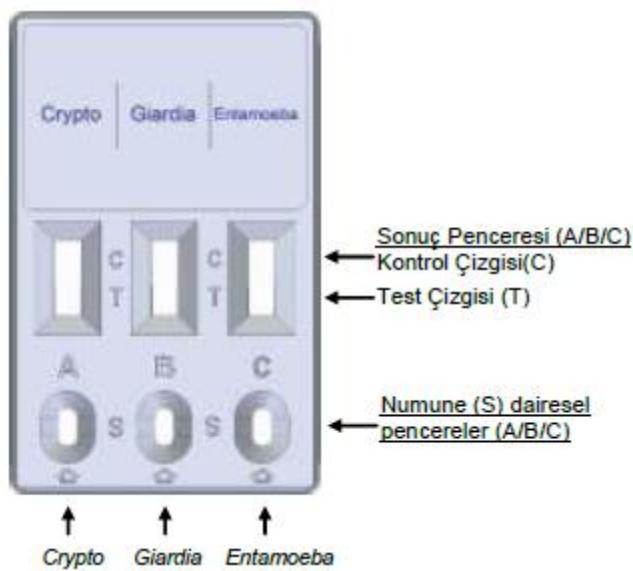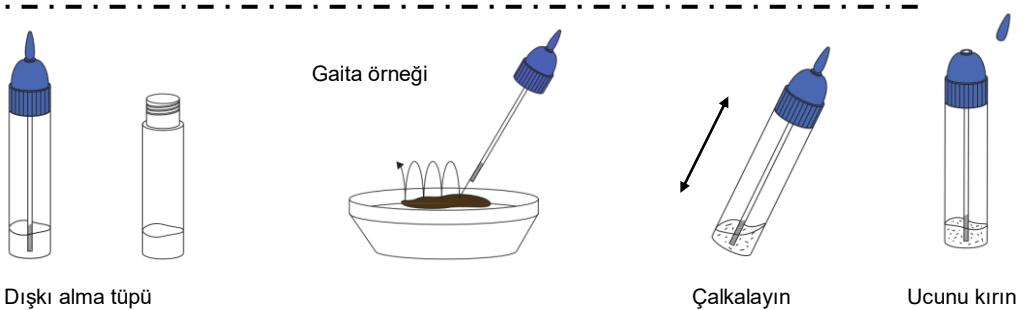

Cryptosporidium (Crypto) Test A-prosedürü

A dairesel penceresine 4 damla ekleyiniz.



Giardia Test B-prosedürü

B dairesel penceresine 4 damla ekleyiniz.




Entamoeba Test C-prosedürü


C dairesel penceresine 4 damla ekleyiniz.



SONUÇLARIN YORUMLANMASI (LÜTFEN AŞAĞIDAKİ RESME BAKINIZ)

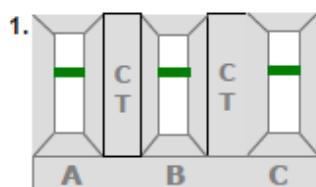


A: Yeşil → Negatif Crypto
B: Yeşil → Negatif Giardia
C: Yeşil → Negatif Entamoeba

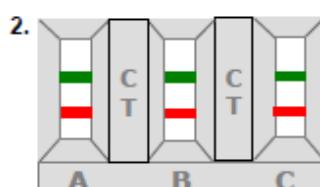


A: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Crypto
B: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Giardia
C: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Entamoeba




A: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Crypto
B: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Giardia
C: Yeşil → Negatif Entamoeba

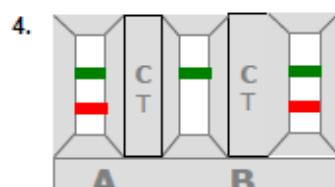


A: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Crypto
B: Yeşil → Negatif Giardia
C: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Entamoeba

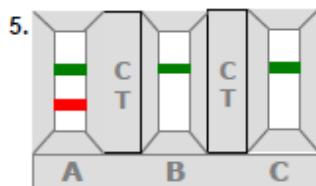


A: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Crypto
B: Yeşil → Negatif Giardia
C: Yeşil → Negatif Entamoeba

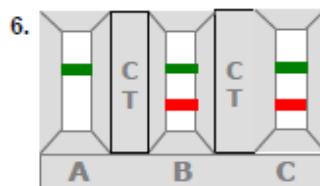

A: Yeşil → Negatif Crypto
B: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Giardia
C: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Entamoeba

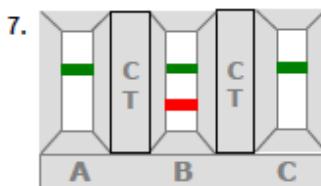

A: Yeşil → Negatif Crypto
B: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Giardia
C: Yeşil → Negatif Entamoeba

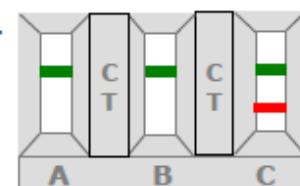

A: Yeşil → Negatif Crypto
B: Yeşil → Negatif Giardia
C: Yeşil/Kırmızı → Pozitif Entamoeba

	A (Crypto)	B (Giardia)	C (Entamoeba)	Sonuçların yorumu
1.	-	-	-	
	YEŞİL	YEŞİL	YEŞİL	Hicbir Cryptosporidium, Giardia veya Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) varlığı saptanmamıştır. Cryptosporidium, Giardia veya Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) kaynaklı enfeksiyon saptanmamıştır.
2.	+	+	+	Cryptosporidium, Giardia ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) varlığı görülmektedir. Cryptosporidium, Giardia ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) kaynaklı enfeksiyon.
3.	+	+	-	Cryptosporidium ve Giardia varlığı saptanmıştır. Cryptosporidium ve Giardia kaynaklı enfeksiyon.
4.	+	-	+	Cryptosporidium ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) varlığı saptanmıştır. Cryptosporidium ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) kaynaklı enfeksiyon.
5.	+	-	-	Cryptosporidium varlığı saptanmıştır. Cryptosporidium kaynaklı enfeksiyon.
6.	-	+	+	Giardia ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) varlığı saptanmıştır. Giardia ve Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) kaynaklı enfeksiyon.
7.	-	+	-	Giardia varlığı saptanmıştır. Giardia kaynaklı enfeksiyon.
8.	-	-	+	Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) varlığı saptanmıştır. Entamoeba (<i>histolytica</i> veya <i>dispar</i>) kaynaklı enfeksiyon.
9.	Her türlü diğer sonuç			A, B veya C geçersiz sonuçları elde edildiğinde, aynı numuneyi kullanarak tahlilin bir başka testle tekrarlanması tavsiye ederiz.

LABTEK

LABTEK TİBBİ TANI ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

LABTEK TİBBİ TANI ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Eski Üsküdar Yolu Cad. Çankırı Sok.
No:1/4 İcerenköy 34752 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 575 18 28 Faks: 0216 573 36 27
www.labtek-tr.com - info@labtek-tr.com

CERTEST
BIOTEC

Pol. Industrial Rio Gallego II
Calle J, No:1 50840 San Mateo
De Gallego Zaragoza SPAIN

