



Hastanızda patojenik
E.histolytica ya da non-
patojenik ***E.dispar***
olduğunu nasıl anlarsınız?

E. histolytica ADEZİN HIZLI ANTİJEN TESTİ

Fekal numunelerdeki **spesifik E. histolytica adezinin** tespitine yönelik



- *E. dispar* ve *E.moshkovskii* ile çapraz-reaksiyona girmez
- Mikroskopiden daha sensitif ve spesifik
- Analitik hassasiyet: 0.2 ng/mL


AVANTAJLAR

- Hızlı ELISA test metodu
- 25 dakikada sonuç
- Basit ve net hasta değerlendirme
- Doğru tanı, doğru tedavi
- Ekonomik kullanım
- Patentli porlu membran
- Yüksek sensitivite, yüksek spesifite
- 25 Testlik ambalaj
- Uzun miad

TECHLAB® E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™

PROSEDÜR

1

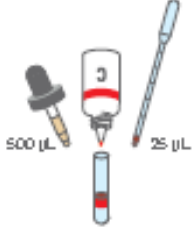

Test tüpüne:

- 500 µL Dilüent
- 1 damla Konjugat
- Numuneden 25 µL (1. Kademe)
- İyice karıştırın

2



Tüpten 500 µL (en üst kademe) küçük Numune Kuyucuğuna transfer edin. Test kasetini oda ısısında 15 dakika bekletin.

3



Yıkama Tamponundan 300 µL Reaksiyon Penceresi'nin geniş kısmına ekleyin. Tamamen emmesine izin verin.

4



Reaksiyon Penceresi'nin geniş kısmına 2 damla Substrat'tan ekleyin. Test kasetini oda ısısında 10 dakika bekletin. Sonuçları okuyun.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI



Pozitif Sonuç



Negatif Sonuç

CE

Scan to learn
more about our new
**E. HISTOLYTICA
QUIK CHEK** test!



Alere International Limited
Parkmore East Business Park
Ballybrit, Galway, Ireland
Tel: +353 (0) 91 429 900
e-mail: professionaldiagnostics@alere.com
alere.com

LABTEK

LABTEK TIBBİ TANİ ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

LABTEK TIBBİ TANİ ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Eski Üsküdar Yolu Cad. Çankırı Sok.
No:1/4 İçerenköy 34752 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 575 18 28 Faks: 0216 573 36 27
www.labtek-tr.com - info@labtek-tr.com